

neodisher[®] FA

Flydende, alkalisk rengøringsmiddel
til specialvaskemaskiner



Vigtigste anvendelsesområder:

Maskinel rengøring af kirurgiske instrumenter, anæstesiudstyr, operationssko og andet medicinsk laboratorieudstyr. Ligeledes velegnet til rengøring af babyflasker på hospitaler og lægeklinikker samt maskinel rengøring af glasvarer i hospitalslaboratorier.

Egenskaber:

neodisher FA er et alsidigt og yderst skånsomt rengøringsmiddel. neodisher FA har en god vaskekraft over for blod, proteiner, dyrkningsmedier og gelatine. Rengøringsmidlet indeholder hverken oxidationsmidler eller dertergenter.

Kirurgiske instrumenter, anæstesiudstyr, laboratorieglass og plast angribes ikke af neodisher FA. Anodiserede aluminiumsoverflader skal først undersøges for deres modstandsdygtighed. Farveskifte kan forekomme for titan og titanlegeringer, hvilket der fx skal tages hensyn til ved rengøring af farvekodede implantater.

neodisher FA kan anvendes med vand af alle hårdhedsgrader.

Anvendelse og dosering:

I specialvaskemaskiner: 2 - 4 ml/l med hensigtsmæssigt doseringsudstyr.

Bemærkninger:

Maskinel rengøring og desinfektion af kirurgiske instrumenter og anæstesiudstyr med termisk desinfektion:

Rengøring: 2 - 4 ml/l neodisher FA

Neutralisering: 1 - 2 ml/l neodisher Z eller neodisher N

Afsluttende skyl: 0,3 - 1,0 ml/l neodisher MediKlar

Deioniseret vand skal anvendes til det afsluttende skyl, hvis pletter ikke må forekomme på de rengjorte instrumenter.

Afvaskning af blod, serum, fødevarerrestere og analyseudstyr fra hospitalslaboratorier og andre analyselaboratorier:

Rengøring: 2 - 4 ml/l neodisher FA

Neutralisering: 1 - 2 ml/l neodisher Z eller neodisher N

Rengøring af babyflasker:

Rengøring: 2 - 4 ml/l neodisher FA

Neutralisering: 1 - 2 ml/l neodisher Z

Efter rengøring afskylles neodisher FA grundigt.

Bland ikke med andre produkter.

Rens doseringssystemet inkl. slange med vand før skift af produkt.

Ved anvendelse et weigomatic[®] doseringssystem får du altid en nøjagtig, sikker og økonomisk dosering. Dr. Weigert er et specialiseret firma, som arbejder i overensstemmelse med WHG (Wasserhaushaltsgesetz, Tyskland). Dr. Weigert konstruerer, installerer og vedligeholder centrale og enkeltstående doseringsenheder, så de passer til de aktuelle forhold.

Kun til professionel anvendelse.

Tekniske data:

Produktregistreringskode: PR-NR: 334829

Vægtfylde (20 °C): 1,5 g/cm³

pH-område (2 - 4 ml/l, bestemt i deioniseret vand ved 20 °C): 11,4 - 11,9

Viskositet (koncentrat, 20 °C): < 10 mPa

Ledningsevne (3 g/l, bestemt i deioniseret vand ved 60 °C): 3,9 mS/cm

Titreringsfaktor: 0,65 (iflg. neodisher titreringsmetode)



Dorte Egelund
Vestre Hedevej 15
4000 Roskilde
Tlf.: +45 4020 2576
de@dorteegelund.dk

Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende viden, og beskriver mulige sikkerhedsforanstaltninger i relation til produktet, men udgør ikke en garanti for produktets egenskaber og fastlægger intet kontraktligt retsforhold.



neodisher[®] FA

Flydende, alkalisk rengøringsmiddel
til specialvaskemaskiner



Indholdsstoffer:	Indholdsstoffer i henhold til EU-forordning nr. 648/2004/EF ang. vaske- og rengøringsmidler: 15 - 30 % fosfater
CE-mærkning:	neodisher FA opfylder kravene for medicinsk udstyr er i henhold til EU-direktiv 93/42/EF.
Opbevaring:	Produktet er følsomt over for frost under -15 °C. 4 års holdbarhed ved anbefalet opbevaring.
Advarsler og sikkerhedsanvisninger:	Klassifikation og mærkning af det leverede koncentrat i henhold til EU-direktiv 1999/45/EF ang. klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater. Faresymbol: C - Ætsende. Indeholder: Dinatrium- og kaliummetasilicat. Risikosætninger: R 34 - Ætsningsfare. Sikkerhedssætninger: S 26 - Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S 27/28 - Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder vand. S36/37/39 - Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/beskyttelsesskærm. S 45 - Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Bortskaf kun emballagen i tom og lukket tilstand. Der henvises til sikkerhedsdatablad for bortskaffelse af produktrester. For yderligere information ang. sikkerhed henvises til sikkerhedsdatabladet. Dette kan fx ses på www.drweigert.de under "Service".

MB 4101 DK/2-1



Dorte Egelund
Vestre Hedevej 15
4000 Roskilde
Tlf.: +45 4020 2576
de@dorteegelund.dk

Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende viden, og beskriver mulige sikkerhedsforanstaltninger i relation til produktet, men udgør ikke en garanti for produktets egenskaber og fastlægger intet kontraktligt retsforhold.

