

neodisher®

ORTHOVARIO



Flydende komponent til rengøring af instrumenter
i Miele ORTHOVARIO-processen

**Vigtigste
anvendelsesområder:**

Til maskinel rengøring af ortopædiske instrumenter og andre kirurgiske instrumenter i Miele's ORTHOVARIO-proces. neodisher ORTHOVARIO anvendes i kombination med et basisk rengøringsmiddel og et oxidationsmiddel.

Egenskaber:

neodisher ORTHOVARIO virker som en rengøringsforstærker ved maskinel rengøring af instrumenter.

neodisher ORTHOVARIO er yderst effektivt til rengøring af instrumenter med blodrester. Angriber IKKE instrumenter af rustfrit stål og aluminium.

Anodiserede aluminiumsoverflader bør testes for deres modstandsdygtighed før rengøring.

Anvendelse og dosering:

I specialvaskemaskiner: 3 - 5 ml/l

Eksempel på en programcyklus i Miele's ORTHOVARIO-proces:

- Forvask med koldt vand.
- Første rengøringstrin ved 55 °C med neodisher ORTHOVARIO.
- Andet rengøringstrin ved 55 - 65 °C med neodisher ORTHOVARIO, neodisher OXIVARIO og neodisher FA.
- 2 mellemskyllinger med vand.
- Afsluttende skyl og varmesterilisation ved 93 °C.

Efterfølgende skal neodisher ORTHOVARIO-opløsningen afskylles helt ved grundig skylning.

Må ikke blandes med andre produktkoncentrater.

Kun til professionel anvendelse.

Tekniske data:

Produktregistreringskode: PR-nr. 2208359

Vægtfylde (20 °C): 1,5 g/cm³

pH-område (3 - 5 ml/l), bestemt i deioniseret vand ved 20 °C: 7 - 9,5

Viskositet (koncentrat, 20 °C): < 50 Pa

Indholdsstoffer:

Indholdsstoffer i henhold til EU-forordning nr. 648/2004/EF ang. vaske- og rengøringsmidler:

5 - 15 % non-ioniske overfladeaktive stoffer.

Indeholder også konserveringsmiddel (1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-hexahydro-1,3,5-triazin).

CE-mærkning:

neodisher ORTHOVARIO opfylder kravene for medicinsk udstyr i henhold til EU-direktiv 93/42/EF.

Opbevaring:

Opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 5 og 30 °C.

2 års holdbarhed ved anbefalet opbevaring.

**Advarsler
og
sikkerhedsanvisninger:**

Produktet er ikke omfattet af EU-direktiv 1999/45/EF ang. klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater.

Bortskaf kun emballagen i tom og lukket tilstand. Der henvises til sikkerhedsdatabladet for bortskaffelse af produktrester.

For yderligere information ang. sikkerhed henvises til sikkerhedsdatabladet. Dette kan fx ses på www.drweigert.de under "Service".

MB 40311 DK/2-1



Dorte Egelund
Vestre Hedevej 15
4000 Roskilde
Tlf.: +45 4020 2576
de@dorteegelund.dk

Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende viden, og beskriver mulige sikkerhedsforanstaltninger i relation til produktet, men udgør ikke en garanti for produktets egenskaber og fastlægger intet kontraktligt retsforhold.



ORTHOVARIO

Er et registreret varemærke tilhørende
Miele & Cie. KG, Gütersloh.